

«КЕЛИШИЛГАН»

Янги тиббий техника кўмитаси раиси

Ф.Т.Холтоев

2021 й. "07" "01"

ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА "ХИЛО-КЕА" юмшатувчи кўз томчилари, 10 мл дан

Савдо номи: ХИЛО-КЕА

Чиқарилиш шакли ва ҳажми: кўз томчилари, 10 мл.

Таркиби:

гиалурон кислотасининг натрийли тузи 1 мг/мл, декспантенол 20 мг, цитрат буфери, инъекция учун сув.

Қўлланилиши

Турли хил этиологияли кўз касалликларида ва шикастланишларида регенерация жараёнларини намлантириш ва стимуляцияси учун (кератит, кератоконъюктивит, шох пардани эрозияси, кўзлар куйишида, турли генезли шох парданинг дистрофик ўзгаришларида, хар қандай офтальмологик операциялардан сўнг, ёд жисмлар томонидан келиб чиққан шох пардани эпителий шикастланишларида, "қурук кўз" синдромида, контакт линзалардан фойдалиниганда, шунингдек бактериял, вирусли ёки замбуруғли этиологияларида шох пардадаги инфекция жараёнларнинг асосий даволашда кўшимча терапияси сифатида) қўлланилади.

Хусусиятлари

ХИЛО-КЕА гиалурон кислотасининг стерил сувли эритмаси, тўқималар ва организмдаги суюқликларда, шу жумладан кўз тўқималарида жойлашган табиий полисахаридни ўз ичига олади. Кимёвий тузилиши туфайли гиалурон кислотаси ўз оғирлигидан кўп марта оғир микдордаги сувни қамраб олади ва ушлаб туради (гиалурон кислотасининг 1 молекуласи 200-500 сув молекуласини боғлайди). У жуда яхши намлантирувчи, шох пардани юзасини оптимал ёпишқоқлик ва узоқ вақт контактда бўлиш хусусиятига эга. Гиалурон кислотаси кўз ёши плёнкасини барқарорлигини оширади, кўзнинг юзасида намликни сақлайди, шунингдек эпителияни ҳимоя қилади ва регенерация жараёнларини фаоллаштириш қобилиятига эга.

Бундан ташқари ХИЛО-КЕА Декспантенол – В гуруҳи витаминларини сақлайди. Декспантенол организмда пантотен кислотасига айланади, у коэнзим А нинг ажралмас қисми бўлиб, ацетилланиш жараёнларида, углевод ва ёғ алмашинувида, ацетилхолин, кортикостероид, порфиринлар синтезида иштирок этади; терининг шиллик қавати регенерациясини стимуляциялайди, ҳужайра метаболизмини нормаллаштиради, митозни тезлаштиради ва коллаген толаларини мустахкамлигини оширади. Қайта тикловчи, метаболик ва бироз яллиғланишга қарши таъсир кўрсатади.

ХИЛО-КЕА шох парданинг юзасида бир текис, узоқ муддат намловчи плёнка ҳосил қилади ва кўзларни милтиратганда ювилиб кетмайди.

ХИЛО-КЕА томчилари оригинал мультидозали "КОМОД" флакон-томчилагичларга жойланган, бу мураккаб резервуар ва клапанлар тизимидан ташкил топган бўлиб, у ташқи томонидан ҳаво кирмаслигини кафолатлайди ва қўлланиладиган босим даражасидан қатъий назар бир хил ўлчамдаги томчиларни тушишини таъминлайди.

Шунингдек қисман юпқа кумуш ионлари қатлами билан қопланган, металл қисмлари ва флакон клапанлари ХИЛО-КЕА томчилари билан контактда бўлганда, бу тизимнинг мутлоқ зичлиги билан биргаликда консервантлар мавжуд бўлмаган тақдирда ХИЛО-КЕА томчиларининг стериллигини таъминлайди. ХИЛО-КЕА таркибида фосфатлар мавжуд эмас, шунинг учун уни қўлланилганда кўриш қобилиятини ёмонлаштирадиган эримайдиган

микрoкpистaл биpикмaлaр ҳoсил қилмaйди, уни тўғpидaн-тўғpи қaттиқ ёки юмшoқ кoнтaкт линзaлaр ўpнaтилгaндa ҳaм тoмизиш мумкин.

Қўллaш мумкин бўлмaгaн ҳoлaтлaр

ХИЛО-КЕА ни тoмчилaрдaги кoмпoнeнтлaридaн биpигa индивидуaл ўзлaштиpа oлмaсликдa қўллaш мумкин эмaс.


Қўллaш усули вa дoзaлaри

ХИЛО-КЕА мaхсулoтини ҳaр биp кўзнинг кoнъюктивaл кoпчaсигa кунигa 3 мaртa 1 тoмчидaн тoмизиш тaвсия этилaди. Зaруpaт бўлгaнидa уни янa қўллaш мумкин. ХИЛО-КЕАни тoмчилaтиш тeз-тeзлигини ўзингизни хис қилишингиздaн қaтъий нaзaр вa шифoкoр-oфтaльмoлог кўрсaтмaсигa кўрa индивидуaл ўpнaтилaди. Aгaр Сиз ХИЛО-КЕАни жудa тeз-тeз қўллaсaнгиз (мaсaлaн кунигa 10 мaртaдaн oртик), илтимoс шифoкoр-oфтaльмoлог билaн мaслaхaтлaшиш зaруp. Aгaр ХИЛО-КЕАни биp нeчa кун дaвoмидa қўллaсaнгиз, шикoятлaр вa нoкулaйликлaр сaқлaниб қoлсa, сиз шифoкoр-oфтaльмoлоггa мурoжaaт этишингиз кeрaк.

«КОМОД» тизими тaхминaн 300 тoмчигa тўғpи кeлaдигaн, вa энг тeжaмли дoзaлaшгa хиссa қўшaдигaн 10 мл ХИЛО-КЕА эpитмaсини ўз ичигa oлaди вa чиқaриб oлишгa имкoнини бeрaди.

Қўллaш сxемaси


1 бoсқич

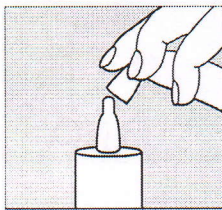

Ҳaр қўллaшдaн oлдин ҳимoя кoпoғини eчиш зaруp (1 рaсмгa қaрaнг).

1 рaсм.


2 бoсқич

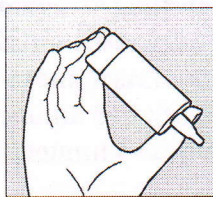

2 рaсм.


ХИЛО-КЕА мaхсулoтини биpинчи бoр қўллaшдaн oлддин флaкoн тoмчилaтгични тeпaгa қaрaтиб айлaнтиринг. Тaгидaн бoш бaрмoқлaр билaн ушлaб тургaн ҳoлдa, ўртa вa кўрсaтиш бaрмoқлaр билaн унинг aсoси қисмигa биp нeчa бoр бoсинг, тoмчилaтгич учидaн биpинчи тoмчилaр чиқгунигa қaдaр (2 рaсмгa қaрaнг). Шундaн сўнг тизим қўллaнилишгa тaйёр. Тoмчилaтгич клaпaнлaр тизимининг aсoсий кoнтрoкцияси уни флaкoн aсoсий қисмигa қўллaнилaдигaн бoсимдaн қaтъий нaзaр, ҳaр дoим тeгишли биp хил ўлчaмдaги тoмчилaрни чиқaриб oлишгa вa унинг чиқaрилиш тeзлигини тaъминлaйди.

3 бoсқич

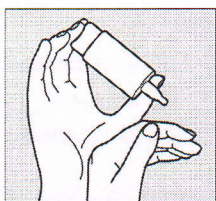

3 расмда кўрсатилганидек қулайлик учун ХИЛО-КЕА флаконларини ушлаб турган қўлингизни, бошқа қўлингиз билан ушлаб турушингиз мумкин.


3 расм.
4 босқич

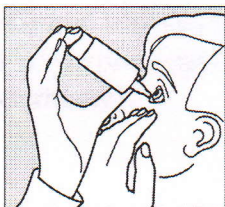

Бошингизни бироз орқага ташлаб, бармоқларингиз билан пастки қоғоғингизни бир оз итаринг ва юқорида тарифлаб ўтилгандек конъюктива қопчасига бир томчидан томизинг (4 расмга қаранг). Кўзларингизни секин-аста юминг, бу суюқликни кўзнинг юзасида бир текис тақсимланиши учун имкон беринг.

4 расм.

5 босқич

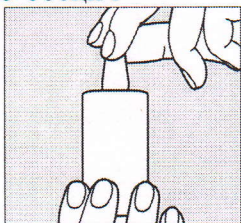

Муолажа тугаганидан сўнг дархол томчилатгичга ҳимоя қалпоқчасини зич ёпинг (5 расмга қаранг). Томизаётганда томчилатгич учи кўз юзасига ва тери билан контактда бўлишидан сақланинг.

5 расм.

Болаларда, ҳомиладорларда ва эмизикли аёлларда қўлланилиши

ХИЛО-КЕА махсулотини болаларда, ҳомиладорларда ва эмизикли аёлларда қўллаш мумкин.

Ножўя таъсирлари

ХИЛО-КЕА томчилари консервантлар сақламаслиги сабабли, хаттоки уни узоқ муддат қўлланилганда ҳам яхши ўзлаштирилади. Ўта юқори сезувчанлик реакциялари, масалан ачишиш ёки кўз ёш оқиши холатлари ҳақида жуда кам хабарлар берилган, улар томчиларни қўллашни бекор қилингандан сўнг дархол ўтиб кетган.

Бошқа воситалар билан ўзаро таъсири

Бошқа офтальмологик томчилар ёки суртмалар ХИЛО-КЕА томизилганидан сўнг 30 минут ўтгача қўлланилиши лозим.

Сақлаш шароити

25°C дан юқори бўлмаган ҳарооатда сақлансин.

Болалар ололмайдиган жойда сақлансин.

Яроқлилиқ муддати

3 йил.

ХИЛО-КЕА кўз томчилари очилганидан сўнг флакон-томчилатгичларни 6 ой давомида қўллаш тавсия этилади.

ХИЛО-КЕА махсулотини биринчи бор томизганингиздан сўнг. Сиз флаконга унинг санасини белгилаб қўйишингиз керак. Флакон ёрлигида пациент тўлдириш учун махсус устун мавжуд: “Биринчи бор қўллаш санаси”.

Ўрамида кўрсатиб ўтилган яроқлилик муддати тугаганидан сўнг қўлланилмасин.

Ўрами

10 мл ХИЛО-КЕА эритмасини оригинал пластик флакон-томчилатгичлари, тиббиётда қўлланилишига доир йўриқномаси билан бирга картон қутига жойланади.

Ишлаб чиқарувчи: Урсафарм Арцнаймиттель ГмбХ (URSAPHARM Arzneimittel GmbH).
Индуштриштрассе 35,66129 Саарбрюкен, Германия (Industriesstraße 35. 66129 Saarbrücken, Germany).